



1212-Budapest, Dunadűlő 5/a

www.creativdental.hu

iroda: 1212- Budapest Széchenyi I 92/b

mobil: +36-30-262-1077

Tel.Fax: 061-276-0435 061-425-1103

info@creativdental.hu

WHITEsmile POWER BLEACHING Gel XTRA

A WHITEsmile POWER BLEACHING Gel XTRA egy duplafecskendő fogfehérítő rendszer, rendelési használatra – gyors és könnyű kezelés, akár egyetlen alkalommal.

A WHITEsmile POWER BLEACHING Gel XTRA kétféle változatban áll rendelkezésre: 38%-os Hydrogen Peroxid (H₂O₂) tartalommal, elsősorban fogfehérítő lámpa nélküli használatra ajánlott, valamint LIGHT (32% HP) a lámpás kezelésekhez. (Különösen ajánlott a WHITEsmile fogfehérítő lámpához)

Mindkét variáció alkalmazása pontosan ugyanolyan, leszámítva a lámpa használatát. A gél csepegés mentes. Az adagoló segítségével könnyedén applikálható a fogakra. Az összekevert gél piros színű. Használat után a fecskendő biztonságosan lezárható, így a maradék anyag új keverőcsőr használata mellett, másik paciensenél később felhasználható.

Magas Hydrogen Peroxid koncentrációja miatt a WHITEsmile POWER BLEACHING Gel XTRA nagyon reagens.

A kapcsolatot a bőrrel vagy a szemekkel el kell kerülni, ajánlott kesztyű és védőszemüveg használata. Ha a gél bőrrel érintkezik, azonnal öblítse le vízzel. Az érintett területen fehér foltok jelenhetnek meg, égető érzést tapasztalhat. A tünetek kb. 30–60 perc után megszűnnek.

Ha a gél szembe kerül, azonnal öblítse ki és kérje orvos tanácsát. A fehérítés utáni 1-2 hétben szüneteltesse a koronakészítést, fogtömést és hasonló eljárásokat, a színelkülönbségek megakadályozása érdekében. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a fehérítést követő 2-3 napban csökken a ragasztások hatékonysága. Nem ajánlott a szer használata altatásban, valamint állapotos vagy szoptató anyáknál és 16 év alatti gyermekeknél.

Előkészület

A páciens eredeti fogszínét kérjük, dokumentálja. Professzionális fogtisztítás elvégzése javasolt. Szájterpesz/szájkampó segítségével tegye szabaddá a fogakat, ha szükséges, használjon vattarollnit és vazelint.

A WHITEsmile Gingiva Protector ínyvédő alkalmazása

Erősítse hozzá a fecskendőhöz az adagolóvéget. Gondosan szárítsa meg az ínyt, hogy az ínyvédő a teljes eljárás alatt biztonságosan tartson és kössön. Kenje be az ínyvédővel az ínyt (3-4mm) és a fog nyakát (0,5-1mm). Íves mozdulatokkal világítsa meg az ínyvédőt 30-40 másodpercig.

Ínyvédő helyett használhat kofferdam gumit.

Tipp:

Az ínyvédőt a WHITEsmile fehérítő lámpával is megvilágíthatja!

Fehérítő eljárás

Helyezze a fecskendőre a keverőcsört. Applikálja a fehérítő szert közvetlen a fog felületére, 1-2 mm vastag rétegben (vigyázzon, hogy a szer bőrrel vagy ruhával ne érintkezzen). Hagyja hatni 12-15 percig.

Csökkentse az alkalmazási időt és ciklusokat, ha a páciens túlérzékenységet mutat. A WHITEsmile POWER BLEACHING Gel XTRA-t polimerizációs lámpával is aktiválhatja (10mp elegendő foganként). Más fehérítő lámpát, illetve lézert szintén alkalmazhat (ellenőrizze a gyártói ajánlást). Ilyen esetekben a kezelési idő 10 percre csökkenthető.

Elszívással távolítsa el a gélt a fogakról, ne öblítse, majd vigyen fel újabb gél réteget. Ezt az eljárást háromszor ismételheti.

Az utolsó felvitel után távolítsa el a gélt elszívással, majd öblítse.

Ezután eltávolíthatja az ínyvédőt, a szájkampót és a vattarollnikat. Végül a páciens öblítse ki a száját meleg vízzel.

Amennyiben fogfehérítő lámpát alkalmaz:

Készítse a lámpát a páciens szájának közelébe. WHITEsmile fehérítő lámpa használata esetén a páciens és a kezelő számára egyaránt védőszemüveg használata ajánlott. Egyéb lámpák használata esetén tartsa be a gyártó ajánlását.

A kezelésnek köszönhetően páciense egy óra elteltével már élvezheti új, fehér mosolyát. A fehérítés után szintén dokumentálja a fog színét. Kezelje a fogat fluoriddal. A nemkívánatos túlérzékenységet elkerülendő, alkalmazzon WHITEsmile AFTER BLEACHING MOUSSE-t – applikálja a fogakra, és hagyja hatni 10 percig.

Ajánlás – Az elért eredmény fenntartása érdekében ajánlja páciensének a WHITEsmile WHITENING TOOTHPASTE fogkrémet 30 százalékos Xylitol tartalommal.

Mellékhatások

Amennyiben a páciens égető hatást érez a szájában, a kezelést le kell állítani, a gélt el kell távolítani. Fluoridos gél vagy WHITEsmile AFTER BLEACHING MOUSSE fehérítés utáni használatával az érzékenység csökkenthető.

Biztonsági okokból a páciens viseljen védőszemüveget. További információt talál a WHITEsmile általános orvosi tájékoztatójában.

Tárolás és szavatosság

A WHITEsmile POWER BLEACHING Gel XTRA fehérítőt tárolja hűvös helyen vagy hűtőszekrényben (4 – 12 °C). A csomagon szereplő lejárat dátum csak a megfelelően tárolt anyagok esetében érvényes. Ne fagyassza le a terméket és óvja hőtől, valamint közvetlen napfénytől.

Jakab Ildikó +36-30-262-1077

Ricsli János +36-30-214-2714

Dési Anita +36-30-973-4756

Hajdú Imre +36-30-727-1498

Jakab András +36-30-515-1165

Búsné Papp Tamara +36-30-863-8630

Gál Henrik +36-30-895-2315

www.creativdental.hu

CreativDental